

# GD ENZIMATICO10

## Detergente a base enzimatica concentrato

Dispositivo Medico CE di Classe I conforme al Regolamento (UE) 745/2017

### CARATTERISTICHE

GD ENZIMATICO10 è un detergente altamente concentrato da utilizzare per la detergenza degli strumenti in ambito medico-chirurgico ed odontoiatrico. La presenza di Enzimi facilita la rimozione del residuo organico anche da strumenti cavi o in prossimità di piegature e viti.

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Tensioattivi non ionici 15-30%;

Tensioattivi anionici 5-15%;

Enzimi;

Profumo (Limonene, Citral),

Conservante (Benzisotiazolinone)

### DATI TECNICI

Stato fisico: liquido

Colore: Incolore

Odore: caratteristico

pH: 5-7

Biodegradabilità: Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al regolamento CE n.648/04

### MODALITÀ D'USO

Diluire in acqua in ragione del 2-10%. Si consiglia di versare il contenuto di un misurino di GD ENZIMATICO10 in un litro d'acqua del rubinetto tiepida (circa 40°) e mescolare accuratamente. Prima di detergere gli strumenti nella soluzione preparata, devono essere decontaminati con un prodotto specifico, quindi risciacquarli usando acqua fredda ed immergerli nella soluzione di GD ENZIMATICO10 per dieci minuti. In presenza di residui secchi o di sporco ostinato, prolungare l'immersione a 1 ora ed eventualmente usare uno spazzolino. Risciacquare gli strumenti con acqua prima dell'utilizzo. Particolarmente consigliato per la deterzione con vasche ad ultrasuoni. Agitare prima dell'uso.

### SETTORI E CAMPI D'APPLICAZIONE

Per il settore medico ed odontoiatrico, veterinario, estetico e tatuatori, per la deterzione di strumenti e materiali in vetro, plastica, metallo, endoscopi, etc.

### AVVERTENZE

**Indicazioni di pericolo:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P305-P351-P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. **Contiene:** Alcol grasso alcossilato polimero. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura, se correttamente conservato, il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta.

### SCADENZA

3 Anni.



## PRODOTTI CORRELATI



Vasca ULTRASUONI  
Codice 5196



Maxisteril  
Codice 5194



Ministeril  
Codice 5192

Confezione da 6 flaconi da 1000 ml

Codice 5212

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.

RV052021

www.golmar.com

TORINO - Show Room  
BORGARETTO (TO)  
PERO (MI)  
ROVATO (BS)

Tel. +(39) 011.346722  
Tel. +(39) 011.3583310  
Tel. +(39) 02.38103456  
Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR)  
GENOVA  
OSPEDALETTO (PI)  
BALERNA (CH-Svizzera)

Tel. +(39) 0783.405586  
Tel. +(39) 010.7450004  
Tel. +(39) 050.983248  
Tel. +(41) 91.6461177

**GOLMAR®**  
IGIENE PROFESSIONALE

LIMENA (PD)  
POMEZIA (Roma)  
CATANIA  
PALERMO

Tel. +(39) 049.768766  
Tel. +(39) 06.91602060  
Tel. +(39) 095.304304  
Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN)  
CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
MANFREDONIA (FG)

Tel. +(39) 071.732242  
Tel. +(39) 085.959765  
Tel. +(39) 0884.541464